

# DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen overtreffen 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM¹ contactlenzen

## OPZET VAN DE STUDIE

### DOELSTELLING

Het beoordelen van de klinische prestatie van DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen in vergelijking met 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM contactlenzen.

### METHODOLOGIE

- Cross-over, gerandomiseerd, gemaskeerd onderzoek
- Duur van de studie: twee weken
- n=71 deelnemers in acht onafhankelijke studiecentra verspreid over de VS
- Proefpersonen werden gerandomiseerd om een van de studieproducten te dragen en dagelijks te vervangen gedurende één week, gevolgd door het andere studieproduct
- Producten die vergeleken werden: DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen (test) en 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM contactlenzen (controle)
- DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen werden getest in de cilindersterkten -0,75D en -1,50D. 1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM contactlenzen werden getest in de cilindersterkten -0,75D, -1,25D en -1,50D
- Beide contactlenzen werden getest met assen op 90° en 180°
- Initiële subjectieve antwoorden — inzake comfort — werden bekomen kort nadat de lenzen werden aangebracht
- Symptomen, overige subjectieve antwoorden en objectieve beoordelingen werden bekomen tijdens de nacontrole

### INCLUSIECRITERIA

- Bestaande dragers van zachte torische lenzen, met een cilindersterkte van -0,50D tot en met -2,00D
- Dragere van HEMA-lenzen (30%-50% van de geregistreerden)
- Monovision dragers die akkoord gingen om, voor de duur van de studie, in beide ogen een correctie voor ver te dragen
- Zicht voor ver tot ten minste 0.5 corrigeerbaar in elk oog




**NIEUW**

# Superieure prestatie op het oog leidt tot een uitstekende pasvorm en comfort<sup>1</sup>

## SUPERIEURE PRESTATIE QUA PASVORM EN UITSTEKENDE STABILITEIT<sup>1</sup>

DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen met **Precision Curve™** Lens Design bleken een significant betere optimale algemene pasvorm te hebben.

### Percentage lenzen na een week dragen

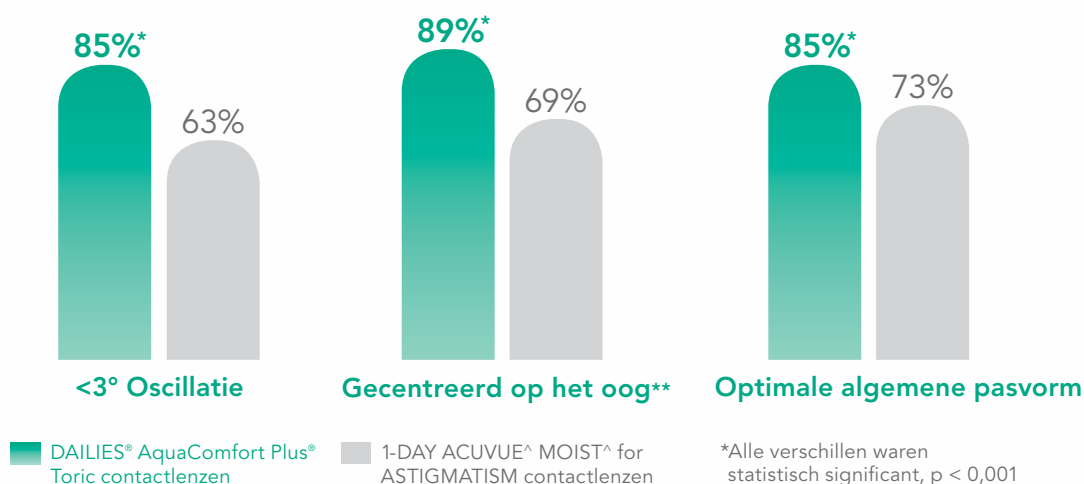

## Optimale pasvorm leidt tot uitstekende prestatie op het oog

Een optimale pasvorm is belangrijk voor:



EEN GOEDE  
GEZICHTSSCHERPTE



STABILITEIT  
OP HET OOG



ALGHEELE  
VISUELE PRESTATIE

Upgrade uw astigmaten naar DAILIES® AquaComfort Plus® Toric contactlenzen voor optimaal aanpassucces.

Met 150% meer parameters dan  
FOCUS® DAILIES® Toric contactlenzen

Beschikbaar in  
30 pack en 90 pack

