

Omrekening van bril- naar lenssterkte

Hoe deze tabel gebruiken om de juiste sterkte van de DAILIES® AquaComfort Plus® Toric lens te kiezen?

(Let op: de lenssterkten in de tabel zijn reeds omgerekend naar HVA = 0)



- In de linkerkolom kiest u de sferische brilsterkte.
- In de rij bovenaan kiest u de cilindersterkte van de bril.
- Op het punt waar de geselecteerde rij en kolom elkaar kruisen, vindt u de aanbevolen initiële sterkte van uw DAILIES® AquaComfort Plus® Toric paslens.
- Kies de asrichting van de DAILIES® AquaComfort Plus® Toric paslens zo dicht mogelijk bij deze van de bril of de refractie (beschikbare assen zijn: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°).
- Bij het bestellen van de definitieve lens dient u rekening te houden met een eventuele verdraaiing van de lens op het oog.

		CILINDERSTERKTE IN DE BRIL																																			
		-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00		-2.25		-2.50																					
		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil																					
SFERISCHE STERKTE IN DE BRIL	HVA 12 mm	-9.00	-8.50	-8.00	-7.50	-7.00	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00	
	HVA 12 mm	-8.50	-8.00	-7.50	-7.00	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00		
	HVA 12 mm	-8.00	-7.50	-7.00	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00			
	HVA 12 mm	-7.50	-7.00	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00				
	HVA 12 mm	-7.00	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00					
	HVA 12 mm	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00						
	HVA 12 mm	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00							
	HVA 12 mm	-5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00								
	HVA 12 mm	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00									
	HVA 12 mm	-4.50	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00										
	HVA 12 mm	-4.00	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00											
	HVA 12 mm	-3.50	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00												
	HVA 12 mm	-3.00	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00													
	HVA 12 mm	-2.50	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00														
	HVA 12 mm	-2.00	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00															
	HVA 12 mm	-1.50	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																
	HVA 12 mm	-1.00	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																	
	HVA 12 mm	-0.50	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																		
	HVA 12 mm	+0.00	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																			
	HVA 12 mm	+0.25	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																				
HVA 12 mm	+0.50	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																						
HVA 12 mm	+0.75	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																							
HVA 12 mm	+1.00	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																								
HVA 12 mm	+1.25	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																									
HVA 12 mm	+1.50	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																										
HVA 12 mm	+1.75	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																											
HVA 12 mm	+2.00	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																												
HVA 12 mm	+2.25	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																													
HVA 12 mm	+2.50	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																														
HVA 12 mm	+2.75	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																															
HVA 12 mm	+3.00	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																																
HVA 12 mm	+3.25	+3.50	+3.75	+4.00																																	
HVA 12 mm	+3.50	+3.75	+4.00																																		
HVA 12 mm	+3.75	+4.00																																			
HVA 12 mm	+4.00																																				
		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil		sf cil	
		STERKTE PASLENS																																			

Omrekening van bril- naar lenssterkte

Hoe deze tabel gebruiken om de juiste sterkte van de AIR OPTIX® for ASTIGMATISM lens te kiezen?

(Let op: de lenssterkten in de tabel zijn reeds omgerekend naar HVA = 0)



- In de linkerkolom kiest u de sferische brilsterkte.
- In de rij bovenaan kiest u de cilindersterkte van de bril.
- Op het punt waar de geselecteerde rij en kolom elkaar kruisen, vindt u de aanbevolen initiële sterkte van uw AIR OPTIX® for ASTIGMATISM paslens.
- Kies de asrichting van de AIR OPTIX® for ASTIGMATISM paslens zo dicht mogelijk bij deze van de bril of de refractie (alle assen beschikbaar in stappen van 10°).
- Bij het bestellen van de definitieve lens dient u rekening te houden met een eventuele verdraaiing van de lens op het oog.

CILINDERSTERKTE IN DE BRIL

HVA 12 mm	-0.75		-1.00		-1.25		-1.50		-1.75		-2.00		-2.25		-2.50		-2.75		-3.00	
	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil	sf	cil
-11.50	-10.00	-0.75*	-10.00	-0.75	-10.00	-0.75	-10.00	-1.25	-10.00	-1.25	-10.00	-1.25	-10.00	-1.75	-10.00	-1.75	-10.00	-1.75	-10.00	-2.25
-11.25	-10.00	-0.75*	-10.00	-0.75	-10.00	-0.75	-10.00	-1.25	-10.00	-1.25	-10.00	-1.25	-10.00	-1.75	-10.00	-1.75	-10.00	-1.75	-10.00	-2.25
-11.00	-10.00	-0.75*	-9.50	-0.75	-9.50	-0.75	-9.50	-1.25	-9.50	-1.25	-9.50	-1.25	-9.50	-1.75	-9.50	-1.75	-9.50	-1.75	-9.50	-2.25
-10.75	-10.00	-0.75*	-9.50	-0.75	-9.50	-0.75	-9.50	-1.25	-9.50	-1.25	-9.50	-1.25	-9.50	-1.75	-9.50	-1.75	-9.50	-1.75	-9.50	-2.25
-10.50	-9.50	-0.75*	-9.00	-0.75	-9.00	-0.75	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-2.25
-10.25	-9.50	-0.75*	-9.00	-0.75	-9.00	-0.75	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-2.25	-9.00	-2.25
-10.00	-9.00	-0.75*	-9.00	-0.75	-9.00	-0.75	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.25	-9.00	-1.75	-9.00	-1.75	-9.00	-2.25	-9.00	-2.25
-9.75	-9.00	-0.75*	-8.50	-0.75	-8.50	-0.75	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.75	-8.50	-1.75	-8.50	-2.25	-8.50	-2.25
-9.50	-8.50	-0.75*	-8.50	-0.75	-8.50	-0.75	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.75	-8.50	-1.75	-8.50	-2.25	-8.50	-2.25
-9.25	-8.50	-0.75*	-8.50	-0.75	-8.50	-0.75	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.25	-8.50	-1.75	-8.50	-1.75	-8.50	-2.25	-8.50	-2.25
-9.00	-8.50	-0.75*	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-2.25	-8.00	-2.25
-8.75	-8.00	-0.75*	-8.00	-0.75	-8.00	-0.75	-8.00	-1.25	-8.00	-1.25	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-1.75	-8.00	-2.25	-8.00	-2.25
-8.50	-8.00	-0.75*	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25
-8.25	-7.50	-0.75*	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25
-8.00	-7.00	-0.75*	-7.50	-0.75	-7.50	-0.75	-7.50	-1.25	-7.50	-1.25	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-1.75	-7.50	-2.25	-7.50	-2.25
-7.75	-7.00	-0.75*	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-2.25	-7.00	-2.25
-7.50	-7.00	-0.75*	-7.00	-0.75	-7.00	-0.75	-7.00	-1.25	-7.00	-1.25	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-1.75	-7.00	-2.25	-7.00	-2.25
-7.25	-6.50	-0.75*	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-2.25	-6.50	-2.25
-7.00	-6.50	-0.75*	-6.50	-0.75	-6.50	-0.75	-6.50	-1.25	-6.50	-1.25	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-1.75	-6.50	-2.25	-6.50	-2.25
-6.75	-6.00	-0.75*	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25
-6.50	-6.00	-0.75*	-6.00	-0.75	-6.00	-0.75	-6.00	-1.25	-6.00	-1.25	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-1.75	-6.00	-2.25	-6.00	-2.25
-6.25	-5.75	-0.75*	-5.75	-0.75	-5.75	-0.75	-5.75	-1.25	-5.75	-1.25	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-1.75	-5.75	-2.25	-5.75	-2.25
-6.00	-5.50	-0.75*	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-2.25	-5.50	-2.25
-5.75	-5.25	-0.75*	-5.50	-0.75	-5.50	-0.75	-5.50	-1.25	-5.50	-1.25	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-1.75	-5.50	-2.25	-5.50	-2.25
-5.50	-5.25	-0.75*	-5.25	-0.75	-5.25	-0.75	-5.25	-1.25	-5.25	-1.25	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-1.75	-5.25	-2.25	-5.25	-2.25
-5.25	-5.00	-0.75*	-5.00	-0.75	-5.00	-0.75	-5.00	-1.25	-5.00	-1.25	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-1.75	-5.00	-2.25	-5.00	-2.25
-5.00	-4.75	-0.75*	-4.75	-0.75	-4.75	-0.75	-4.75	-1.25	-4.75	-1.25	-4.75	-1.75	-4.75	-1.75	-4.75	-2.25	-4.75	-2.25	-4.75	-2.25
-4.75	-4.50	-0.75*	-4.50	-0.75	-4.50	-0.75	-4.50	-1.25	-4.50	-1.25	-4.50	-1.75	-4.50	-1.75	-4.50	-2.25	-4.50	-2.25	-4.50	-2.25
-4.50	-4.25	-0.75	-4.25	-0.75	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.25	-4.25	-1.75	-4.25	-1.75	-4.25	-2.25	-4.25	-2.25	-4.25	-2.25
-4.25	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25	-4.25	-2.25
-4.00	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-0.75	-4.00	-1.25	-4.00	-1.25	-4.00	-1.75	-4.00	-1.75	-4.00	-2.25	-4.00	-2.25	-4.25	-2.25
-3.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-0.75	-3.75	-1.25	-3.75	-1.25	-3.75	-1.75	-3.75	-1.75	-3.75	-2.25	-3.75	-2.25	-4.00	-2.25
-3.50	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-0.75	-3.50	-1.25	-3.50	-1.25	-3.50	-1.75	-3.50	-1.75	-3.50	-2.25	-3.50	-2.25	-3.75	-2.25
-3.25	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-0.75	-3.25	-1.25	-3.25	-1.25	-3.25	-1.75	-3.25	-1.75	-3.25	-2.25	-3.25	-2.25	-3.50	-2.25
-3.00	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-0.75	-3.00	-1.25	-3.00	-1.25	-3.00	-1.75	-3.00	-1.75	-3.00	-2.25	-3.00	-2.25	-3.25	-2.25
-2.75	-2.75	-0.75	-2.75	-0.75	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.25	-2.75	-1.75	-2.75	-1.75	-2.75	-2.25	-2.75	-2.25	-3.00	-2.25
-2.50	-2.50	-0.75	-2.50	-0.75	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.25	-2.50	-1.75	-2.50	-1.75	-2.50	-2.25	-2.50	-2.25	-2.75	-2.25
-2.25	-2.25	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-2.25	-2.25	-2.25	-2.50	-2.25
-2.00	-2.00	-0.75	-2.00	-0.75	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.25	-2.00	-1.75	-2.00	-1.75	-2.00	-2.25	-2.00	-2.25	-2.25	-2.25
-1.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-1.75	-2.25	-1.75	-2.25	-2.00	-2.25
-1.50	-1.50	-0.75	-1.50	-0.75	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.25	-1.50	-1.75	-1.50	-1.75	-1.50	-2.25	-1.50	-2.25	-1.75	-2.25
-1.25	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.25	-1.75	-1.25	-1.75	-1.25	-2.25	-1.25	-2.25	-1.50	-2.25
-1.00	-1.00	-0.75	-1.00	-0.75	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.25	-1.00	-1.75	-1.00	-1.75	-1.00	-2.25	-1.00	-2.25	-1.25	-2.25
-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.25	-0.75	-1.75	-0.75	-1.75	-0.75	-2.25	-0.75	-2.25	-1.00	-2.25
-0.50	-0.50	-0.75	-0.50	-0.75	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.25	-0.50	-1.75	-0.50	-1.75	-0.50	-2.25	-0.50	-2.25	-0.75	-2.25
-0.25	-0.25	-0.75	-0.25	-0.75	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.25	-0.25	-1.75	-0.25	-1.75	-0.25	-2.25	-0.25	-2.25	-0.50	-2.25
+0.00	+0.00	-0.75	+0.00	-0.75	+0.00	-1.25	+0.00	-1.25	+0.00	-1.25	+0.00	-1.75	+0.00	-1.75	+0.00	-2.25	+0.00	-2.25	-0.25	-2.25
+0.25	+0.25	-0.75	+0.25	-0.75	+0.25	-1.25	+0.25	-1.25	+0.25	-1.25	+0.25	-1.75	+0.25	-1.75	+0.25	-2.25	+0.25	-2.25	+0.00	-2.25
+0.50	+0.50	-0.75	+0.50	-0.75	+0.50	-1.25	+0.50	-1.25	+0.50	-1.25	+0.50	-1.75	+0.50	-1.75	+0.50	-2.25	+0.50	-2.25	+0.25	-2.25
+0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-0.75	+0.75	-1.25	+0.75	-1.25	+0.75	-1.25	+0.75	-1.75	+0.75	-1.75	+0.75	-2.25	+0.75	-2.25	+0.50	-2.25
+1.00	+1.00	-0.75	+1.00	-0.75	+1.00	-1.25	+1.00	-1.25	+1.00	-1.25	+1.00	-1.75	+1.00	-1.75	+1.00	-2.25	+1.00	-2.25	+0.75	-2.25
+1.25	+1.25	-0.75	+1.25	-0.75	+1.25	-1.25	+1.25	-1.25	+1.25	-1.25	+1.25	-1.75	+1.25	-1.75	+1.25	-2.25	+1.25	-2.25	+1.00	-2.25
+1.50	+1.50	-0.75	+1.50	-0.75	+1.50	-1.25	+1.50	-1.25	+1.50	-1.25	+1.50	-1.75	+1.50	-1.75	+1.50	-2.25	+1.50	-2.25	+1.25	-2.25
+1.75	+1.75	-0.75	+1.75	-0.75	+1.75	-1.25	+1.75	-1.25	+1.75	-1.25	+1.75	-1.75	+1.75	-1.75	+1.75	-2.25	+1.75	-2.25	+1.50	-2.25
+2.00	+2.00	-0.75	+2.00	-0.75	+2.00	-1.25	+2.00	-1.25	+2.00	-1.25	+2.00	-1.75	+2.00	-1.75	+2.00	-2.25	+2.00	-2.25	+1.75	-2.25
+2.25	+2.25	-0.75	+2.25	-0.75	+2.25	-1.25	+2.25	-1.25	+2.25	-1.25	+2.25	-1.75	+2.25	-1.75	+2.25	-2.25	+2.25	-2.25	+2.00	-2.25
+2.50	+2.50	-0.75	+2.50	-0.75	+2.50	-1.25	+2.50	-1.25	+2.50	-1.25	+2.50	-1.75	+2.50	-1.75	+2.50	-2.25	+2.50	-2.25	+2.25	-2.25
+2.75	+2.75	-0.75	+2.75	-0.75	+2.75	-1.25	+2.75	-1.25	+2.75	-1.25	+2.75	-1.75	+2.75	-1.75	+2.75	-2.25	+2.75	-2.25	+2.50	-2.25
+3.00	+3.00	-0.75	+3.00	-0.75	+3.00	-1.25	+3.00	-1.25	+3.00	-1.25	+3.00	-1.75	+3.00	-1.75	+3.00	-2.25	+3.00	-2.25	+2.75	-2.25
+3.25	+3.25	-0.75	+3.25	-0.75	+3.25	-1.25	+3.25	-1.25												