

- Non alternare o mescolare prodotti per la manutenzione delle lenti appartenenti a sistemi diversi.
- Utilizzare soltanto prodotti per la manutenzione di lenti a contatto morbide, attenendosi alle istruzioni fornite dal fabbricante.
- **NON UTILIZZARE IL CALORE NÉ PRODOTTI FORMULATI PER LENTI RIGIDE O RIGIDE GAS-PERMEABILI.**

Ricordare sempre di:

- Lavare, risciacquare ed asciugare sempre le mani prima di manipolare le lenti a contatto.
- Non conservare mai le lenti tutta la notte solo nella soluzione salina. La soluzione salina NON protegge le lenti dai germi né gli occhi da eventuali infezioni.
- Non riutilizzare la soluzione già usata contenuta nel portalenti.
- Non utilizzare mai le soluzioni dopo la data di scadenza.
- Risciacquare il portalenti ogni volta che da esso si rimuovono le lenti. Utilizzare una soluzione salina sterile o una soluzione per la manutenzione delle lenti **fresca** e, se indicato, lasciarlo asciugare all'aria. Ciò contribuisce ad evitare contaminazioni e gravi lesioni oculari.
- Sostituire regolarmente il portalenti.

SE NON SI PORTANO LE LENTI PER ALCUNI GIORNI, seguire le istruzioni del programma di manutenzione e, se necessario, pulire e disinfettare le lenti prima di rimetterle.

QUANDO NON UTILIZZARE LE LENTI

Le lenti a contatto non devono essere indossate in concomitanza con alcune condizioni di salute o ambientali. Le condizioni che possono interferire con un uso sicuro delle lenti a contatto, sono:

- Allergia, infiammazione, infezione o irritazione all'interno o intorno all'occhio o alle palpebre.
- Periodi di cattiva salute, come forti raffreddori o influenza.
- Uso di alcuni farmaci, inclusi farmaci oftalmici.
- Lacrimazione insufficiente (secchezza oculare).
- Ambienti eccessivamente asciutti o polverosi, che possono rendere poco confortevole l'utilizzo delle lenti.
- Sport acquatici senza l'uso di occhiali da piscina.

Consultare il proprio specialista di fiducia su queste o altre condizioni.

PER USO TERAPEUTICO, lo specialista potrà prescrivere lenti a contatto **AIR OPTIX® NIGHT & DAY® AQUA** e lenti a contatto **AIR OPTIX® EX** per aiutare i processi di guarigione di alcune condizioni corneali.

PROBLEMI POSSIBILI

Anche se le lenti a contatto morbide offrono numerosi vantaggi a chi le indossa, è possibile che si manifestino inconvenienti, riconoscibili in una o più delle seguenti condizioni:

- Sensazione di corpo estraneo
- Lenti fastidiose
- Rossore oculare
- Sensibilità alla luce
- Brucione, fitte, prurito o lacrimazione accentuata
- Riduzione dell'acuità visiva
- Arcobaleno o aloni intorno alle luci
- Aumento della secrezione oculare
- Fastidio/dolore
- Secchezza oculare grave o persistente
- Questi sintomi, se ignorati, possono provocare complicanze gravi.

DURANTE L'USO TERAPEUTICO, un evento avverso può essere indotto da malattie o lesioni originarie oppure dall'uso della lente a contatto. Lo specialista illustrerà la possibilità che condizioni o malattie pre-esistenti possano peggiorare quando si utilizza una lente a contatto morbida per uso terapeutico per il trattamento di un occhio già malato o danneggiato.

CHE COSA FARE SE SI MANIFESTA UN PROBLEMA

Se si verifica uno dei sintomi precedenti:

- **RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LALENTE (O LE LENTI).**
- Se i fastidi o i problemi cessano, controllare accuratamente la(e) lente(i).
- In caso di lente(i) danneggiata(e), NON rimettere la(e) lente(i) nell'occhio(i): sostituire con una lente(i) nuova(e) o consultare lo specialista di fiducia.
- Se la(e) lente(i) è sporca, o presenta ciglia o corpi estranei, o se il problema scompare e la(e) lente(i) non appare(appaiono) danneggiata(e), pulire accuratamente, risciacquare e disinfettare/neutralizzare la(e) lente(i), prima di rimetterla(e).
- Se i sintomi citati persistono dopo la rimozione o l'inserimento della(e) lente(i), rimuovere la(e) lente(i) **IMMEDIATAMENTE** e consultare tempestivamente il proprio specialista di fiducia. Potrebbe essere presente una condizione seria quale infezione, ulcera corneale (cheratite ulcerativa) o irite. Queste condizioni potrebbero progredire rapidamente, provocando la perdita permanente della vista. Reazioni meno gravi quali abrasioni, colorazioni epiteliali e congiuntiviti batteriche, devono essere affrontate e trattate tempestivamente per evitare complicanze.
- La secchezza occasionale può essere alleviata utilizzando gocce lubrificanti e umettanti.
- Se la secchezza persiste consultare lo specialista di fiducia.
- Se una lente aderisce (smette di muoversi), applicare alcune gocce di soluzione lubrificante e attendere fino a quando la lente inizia a muoversi liberamente nell'occhio prima di tentare di rimuoverla. Se la lente continua ad aderire, consultare **IMMEDIATAMENTE** lo specialista di fiducia.

DURANTE L'USO TERAPEUTICO, se il problema si verifica o peggiora, **CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LO SPECIALISTA DI FIDUCIA** e attenersi alle istruzioni fornite.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'utilizzo delle lenti a contatto aumenta il rischio di infezioni oculari. È stato dimostrato che il rischio di cheratite ulcerativa è maggiore tra coloro che indossano lenti a contatto ad uso prolungato rispetto a coloro che indossano lenti ad uso diurno. Aumenta all'aumentare del numero di giorni consecutivi in cui si portano le lenti, tra il giorno in cui le lenti vengono indossate e quello in cui vengono rimosse, a partire dal primo uso notturno. Questo rischio può essere ridotto riconoscendo i segni di un possibile inconveniente e facendo riferimento al paragrafo, "Che cosa fare se si manifesta un problema".

Il fumo aumenta il rischio di cheratite ulcerativa nei portatori di lenti a contatto. È essenziale pulire correttamente e sostituire regolarmente il portalenti.

PER USO TERAPEUTICO, le cure necessarie al trattamento dovranno essere utilizzate con cautela sotto la stretta supervisione del vostro specialista.

PRECAUZIONI

Non condividere le proprie lenti con nessuno in quanto potrebbe verificarsi un contagio microbico tale da provocare gravi problemi alla salute oculare.

- Controllare ogni giorno i propri occhi per assicurarsi che abbiano un aspetto sano, non diano fastidio e la visione sia chiara.
- Mai superare il programma di utilizzo prescritto anche se le vostre lenti non danno fastidio.
- Si raccomanda ai portatori di lenti a contatto di recarsi regolarmente dal proprio specialista come indicato.
- Non utilizzare le lenti o i prodotti per la manutenzione delle lenti dopo la data di scadenza.
- In condizioni di poca luce i portatori di lenti colorate potrebbero riscontrare una visione ridotta degli oggetti a basso contrasto.
- Annotare la corretta gradazione della lente per ciascun occhio.
- Prestare attenzione all'uso di saponi, lozioni, creme, cosmetici o deodoranti, poiché possono provocare irritazione se vengono a contatto con le lenti.
- Inserire le lenti **prima** di truccarsi e rimuoverle **prima** di struccarsi.
- Evitare l'utilizzo di spray, come spray per capelli, vicino agli occhi quando si indossano le lenti, poiché potrebbero provocare irritazione.
- Consultare lo specialista di fiducia per l'utilizzo delle lenti durante le attività sportive, incluso il nuoto.
- In caso di esposizione a vapori nocivi o irritanti, rimuovere le lenti.
- Le lenti a contatto non devono mai entrare in contatto con acqua non sterile (inclusa l'acqua di rubinetto e saliva) in quanto possono verificarsi contaminazioni microbiche che potrebbero provocare danni permanenti agli occhi.
- Informare il proprio datore di lavoro che si indossano le lenti a contatto, in particolare se il lavoro prevede l'impiego di dispositivi di protezione oculare.

ABBREVIAZIONI/ SIMBOLI UTILIZZATI SULL'ETICHETTATURA

| ABBREVIAZIONE / SIMBOLO | DEFINIZIONE |
|-------------------------|---|
| BC | Raggio Base |
| DIA | Diametro |
| PWR | Potere |
| L | Sinistra |
| R | Destra |
| | Simbolo autorizzazione rifiuti di imballaggio |
| | Codice lotto |
| | Utilizzare entro |
| | Sterilizzata in autoclave |
| | Simbolo conformità Europea |
| | Precauzione |
| | Non utilizzare in caso di confezione blister danneggiata |
| | Fabbricante |
| | Rappresentante Autorizzato per la Comunità Europea |
| | Consultare le istruzioni per l'uso |
| | Precauzione: La Legge Federale (Americana) limita la vendita di questo dispositivo a, o su ordine di, uno specialista |

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA



Distribuito da:
Alcon Italia S.p.A.
Viale Giulio Richard, 1/B
20143 Milano

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, Regno Unito

* un marchio Novartis
^ un marchio American Optical

© 2016 Novartis